




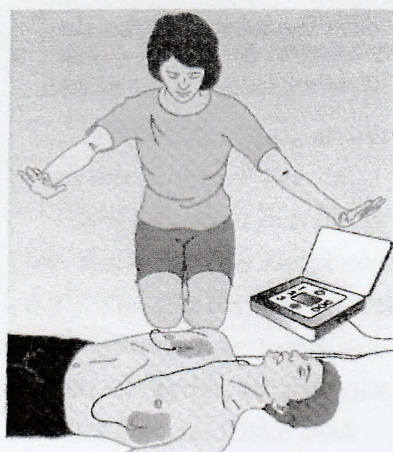

Hjertestarteren analyserer.

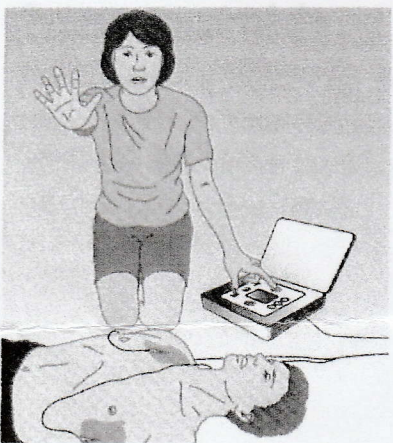

Stød anbefalet.

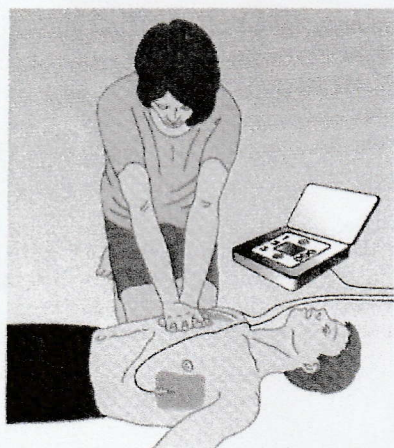

Hjerte-lunge-redning indtil næste analyse 30 tryk/2 indblæsninger.

1. Tænd hjertestarteren
2. Lyt og følg hjertestarterens mundtlige instruktioner
3. Hjertestarteren instruerer førstehjælperen til at:
 - a. Påsætte elektroder på patientens bare bryst
 - b. Sætte stikket fra elektroderne i hjertestarteren
 - c. Undgå berøring af patienten ved analyse af hjerterytme
 - d. Afgive stød (hvis hjerterytmen er stødbar) ved at trykke på stødknappen
 - e. Starte hjerte-lunge-redning hvis nødvendigt (efter afgivelse af stød eller en analyse af ikke stødbar hjerterytme). Hjerte-lunge-redning påbegyndes, hvis patienten er bevidstløs og ikke har normal vejrtrækning

Hjertestarteren vil hvert andet minut udføre en analyse af hjerterytmen. Er rytmen stødbar, kan hjertestarteren afgive et stød. I de to minutter imellem analyserne udføres hjerte-lunge-redning, hvis patienten er bevidstløs og ikke har normal vejrtrækning. Får patienten normal vejrtrækning, slukkes hjertestarteren, og patienten lejres i stabilt sideleje (se side 130). Elektroderne beholdes på. Stopper den normale vejrtrækning, tændes hjertestarteren igen, og proceduren gentages.

Placering af elektroder

Elektroder placeres efter anvisning henholdsvis på langs til højre for brystbenet under kravebenet og på tværs, ca. 10 cm under armhulen. Det er vigtigt at der udvises omhu ved påsætning af elektroder, så der ikke fremkommer luftlommer under elektroderne.

Patienter med meget hår på brystet bør barberes hurtigt, inden elektroderne påsættes. Til det formål kan en engangsskraber med fordel opbevares sammen med hjertestarteren.

Sidder der plaster eller andet på patienten, må elektroderne ikke placeres over dette. Fjern det, hvis det kan gøres hurtigt, alternativt forskydes elektrodeplaceringen.

Hvis patienten har indopereret en lille boks (f.eks. pacemaker), som er følbart under huden, skal elektroderne ikke placeres oven på denne, men forskydes til siden.